

הוראות תחזוקה מכשיר CPAP

פילטר

- פילטר שחור גס: אחת ל-6 חודשים / שנה יש להחליף מסנן שחור . אחת לחודש יש להוציא את הפילטר השחור, לשטוף במים לסחוט, לייבש באמצעות מגבת ולהחזיר למכשיר כשהוא נקי מאבק.

מסיכה

מומלץ לנגב בכל יום את המסיכה לאחר לילה של שימוש, בעיקר את החלקים אשר באים במגע עם העור (אפשרי עם מגבון לח).
מומלץ אחת לחודש, לטבול המסיכה+רצועה בקערה עם מים פושרים+סבון עדין, לנקות ולשטוף ולאחר מכן לייבש על מגבת באזור מוצל.
אין לחשוף את המסיכה וחלקיה לשמש.

צינור

מומלץ אחת ל-3 חודשים לשטוף את הצינור במים+סבון, אפשר להעביר בתוך הצינור את הסבון, לנקות ולשטוף.
ניתן לתלות לייבוש במקלחת במאונך.
אין לחשוף את הצינור לחום או לשמש ישירה.

מיכל לחות – חלק זה רלוונטי למשתמשים במעשיר לחות בלבד

מומלץ לשמור על ניקיון המיכל באופן שוטף, במידה ומצטברת אבנית בתחתית המיכל- ניתן לפתוח את החלק העליון ולנקות עם חומץ או מלח לימון להסרת האבנית.
מיכל הלחות ניתן לשטיפה גם במדיח כלים.
במצב של ניידות עם המכשיר, יש לנתק את מעשיר הלחות \ לרוקנו ממים, על מנת למנוע מגע של מים במכשיר.

שימו לב: במקרה של התקררות ו/או צינון מומלץ לנקות ולחטא את הצינור והמסיכה באופן תכוף יותר.