

## הוראות תחזוקה מכשיר CPAP

### פילטר

- פילטר לבן: אחת ל-4 חודשים יש להחליף את המסנן הלבן. אחת לחודש יש להוציאו לשטוף במים פושרים, לייבש ולהחזיר למקום.

### מסיכה

מומלץ לנגב בכל יום את המסיכה לאחר לילה של שימוש, בעיקר את החלקים אשר באים במגע עם העור (אפשרי עם מגבון לח).  
מומלץ אחת לחודש, לטבול המסיכה+רצועה בקערה עם מים פושרים+סבון עדין, לנקות ולשטוף ולאחר מכן לייבש על מגבת באזור מוצל.  
אין לחשוף את המסיכה וחלקיה לשמש.

### צינור

מומלץ אחת ל-3 חודשים לשטוף את הצינור במים+סבון, אפשר להעביר בתוך הצינור את הסבון, לנקות ולשטוף.  
ניתן לתלות לייבוש במקלחת במאונך.  
אין לחשוף את הצינור לחום או לשמש ישירה.

### מיכל לחות – חלק זה רלוונטי למשתמשים במעשיר לחות בלבד

מומלץ לשמור על ניקיון המיכל באופן שוטף, במידה ומצטברת אבנית בתחתית המיכל- ניתן לפתוח את החלק העליון ולנקות עם חומץ או מלח לימון להסרת האבנית.  
מיכל הלחות ניתן לשטיפה גם במדיח כלים.  
במצב של ניידות עם המכשיר, יש לנתק את מעשיר הלחות \ לרוקנו ממים, על מנת למנוע מגע של מים במכשיר.

שימו לב: במקרה של התקררות ו/או צינון מומלץ לנקות ולחטא את הצינור והמסיכה באופן תכוף יותר.