

שינוי לחץ

בכדי לשנות לחץ יש לבצע את הפעולות הבאות :

1. ודא שהמכשיר מחובר לחשמל ועל התצוגה מופיע כיתוב OFF

2. בכדי להכנס לתפריט יש ללחוץ על לחצנים 4, 5, ו-1 : בו זמנית.

3. יופיע על הצג כיתוב CLINICAL MENU

4. יש לדפדף בלחצן 3 עד שמגיעים ל – UPPER LIMIT

5. יש ללחוץ על לחצן 5/6 לשינוי לחץ למעלה / למטה

6. לחיצה על לחצן 3 ואז יופיע על התצוגה LOWER LIMIT

יש ללחוץ על לחצן 5/6 לשינוי לחץ למעלה / למטה

יש לכבות את המכשיר בלחצן 1 והמכשיר יעבוד בלחצים החדשים.

